




Calciumhydroxid-hochdispers

Packung 15 g Paste

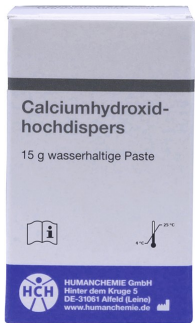

Artikelnr.: 14372

Hersteller: HUMANCHEMIE

Gewicht: 0.042 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 32 mm

Länge: 33 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 15 g Paste

- Reine Calciumhydroxidpaste
- Hochaktiv, mit optimalem pH > 12,4
- Behält seine volle Wirkung auch bei häufigem Öffnen des Fläschchens
- Sofort einsatzbereit
- Gegenüber nichtmetallischem Material durch Membranbildung gewebeschonend

Indikation / Zweckbestimmung:

- Zur direkten Pulpenüberkappung.
- Zur Wurzelbehandlung mit oder ohne Depotphorese[®], auch von Milchzähnen Auch als temporäre Zwischeneinlage
- Zur Herstellung einer Calciumhydroxid-Milch zum Spülen von Wurzelkanälen

Anwendung:

Die Applikation muss zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften (Neutralisation, Desinfektion) immer im feuchten Zustand erfolgen, wonach oberflächlich mit dem Warmluftbläser angetrocknet werden kann.

Pulpenüberkappung:

Die Paste wird in dünner Schicht auf den Kavitätenboden aufgebracht. Danach kann mit dem Warmluftbläser oberflächlich angetrocknet werden. Darüber legt man drucklos eine Unterfüllung

Zwischeneinlage bei der Wurzelbehandlung mit und ohne Depotphorese[®]:

Calciumhydroxid-hochdispers wird mit dem Lentulo in den Wurzelkanal eingebracht. Für die Depotphorese[®] sollte Calciumhydroxid-hochdispers mit Aqua dest. auf eine sahnige Konsistenz gebracht werden.

Spülungen mit Calciumhydroxid-Milch:

Eine Calciumhydroxid-Milch kann durch Aufschütteln von etwa 20 % Paste in Aqua dest. (Ph. Eur.; pharm. Güte) hergestellt werden.