



RelyX™ Ultimate

Nachfüllpackung 8,5 g Automix-Spritze A3 opak, Zubehör



Artikelnr.: 99457
Hersteller: Solventum Dental Solutions
Gewicht: 0.213 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 145 mm
Länge: 231 mm

€ 167,66

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 8,5 g Automix-Spritze A3 opak, 15 Mischkanülen (10 x Standard, 5 x breit), 5 Intraoral-Tip Aufsätze

Das 3M™ RelyX™ Ultimate Adhäsives Befestigungskomposit wurde speziell zur Zementierung von Glaskeramik entwickelt und deckt darüber hinaus das gesamte Indikationsspektrum für die Befestigung von Vollkeramik-, Komposit- oder Metallrestorationen ab. Ebenfalls eignet es sich besonders für den Einsatz bei CAD/CAM-Restorationen.

- Ultimative Haftkraft und hohe Abrasionsbeständigkeit
 - Herausragende Ästhetik bei zahnähnlicher Fluoreszenz
 - Mit 3M™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv in der Technik Ihrer Wahl: selbstätzend, selbstätzend mit selektiver Schmelzätzung, Etch & Rinse
 - Kein zusätzlicher Dunkelhärtungsaktivator, Silan oder Primer notwendig
 - Passende Try-In-Pasten
 - Verarbeitung ab Mischbeginn: 0:10 Min.
 - Lichthärtung: einflächig, von okklusal 0:20 Min., jede weitere Fläche zusätzlich 0:20 Min., 3M™ RelyX™ Fiber Post Wurzelstifte von okklusal 0:40 Min.
 - Selbsthärtung (Abbindezeit nach Mischbeginn): 6:00 Min.
 - Selbsthärtung (Abbindezeit nach Mischbeginn): 6:00 Min.
-
- Definitive Befestigung von Vollkeramik-, Komposit-, oder Metall-Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
 - 2- bis 3-gliedrige Marylandbrücken und 3-gliedrige Inlay-/ Onlaybrücken (nicht bei Patienten mit Bruxismus oder Parodontitis)
 - Definitive Befestigung von Vollkeramik- oder Komposit-Veneers
 - Definitive Befestigung von Vollkeramik-, Komposit- oder Metall-Restorationen auf Implantat-Abutments
 - Definitive Befestigung von Wurzelstiften