

BevistoSept plus



Präparatetyp

BevistoSept plus ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Oberflächendesinfektionspräparat zur Reinigung und Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. medizinischem Inventar und OP-Tischen. Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS* [inkl. HBV, HIV, HCV, Coronavirus u. w. sowie wirksam gegen die unbehüllten Viren Noro und Adeno].

***Begrenzt viruzid PLUS**, d. h. wirksam gegen alle behüllten Viren sowie wirksam gegen die unbehüllten Viren Noro und Adeno.

Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen. Sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber den typischen Kunststoffen (Ausnahmen: Acryl- u. Polycarbonatglas). Nicht geeignet zur Anwendung auf Bildschirmen und anderen nicht alkohol- und korrosionsbeständigen Oberflächen.

Einwirkzeiten und Konzentrationen

Vaccinia (EN 14476): ¹	30 Sek.
Bakterizid (EN 13727): ¹	1 Min.
Levurozid (EN 13624): ¹	1 Min.
Tuberkulozid (EN 14348): ²	1 Min.
Vaccinia (EN 16777): ¹	3 Min.
Norovirus (EN 14476, EN 16777): ²	5 Min.
Adenovirus (EN 14476, EN 16777): ²	5 Min.
Bakterizid, levurozid (EN 16615): ²	5 Min.

¹ hohe Belastung

² niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Aldehyd- und phenolfrei
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)
- Begrenzt viruzid PLUS* [inkl. HBV, HIV, HCV, Coronavirus u. w. sowie wirksam gegen die unbehüllten Viren Noro und Adeno]
- Rückstandsfreies Abtrocknen

- Angenehmer Duft
- Sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber den typischen Kunststoffen (Bitte Anwendungsbereiche beachten, siehe unten!)
- Biologisch gut abbaubar

Anwendungsbereiche

BevistoSept plus ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Oberflächendesinfektionspräparat zur Reinigung und Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. medizinischem Inventar und OP-Tischen. Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen. Sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber den typischen Kunststoffen (Ausnahmen: Acryl- u. Polycarbonatglas). Nicht geeignet zur Anwendung auf Bildschirmen und anderen nicht alkohol- und korrosionsbeständigen Oberflächen.

Anwendungshinweise

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Gegenstände oder Flächen vollständig benetzen und einwirken lassen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Nach Anbruch das Gebinde innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.

Wirkstoffe in 100 g

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid
50,0 g Ethanol

Chemische und physikalische Daten

Aussehen der Flüssigkeit:	klar, farblos
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 7

Biologische Abbaubarkeit

BevistoSept plus ist nach den Kriterien der OECD biologisch abbaubar.

Begutachtung

Gutachten stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Lieferformen

REF	2070	12 x 1 Liter Flasche
REF	2071	5 Liter Kanister

Applikationshilfen

REF	9001	Sprühkopf für 1 Liter Flaschen
REF	9006	Kanisterhahn
REF	9004	Kanisterschlüssel

Produktinformation (DE):

BevistoSept plus

Hinweis: Bei Anwendung ist die Gebrauchsanweisung auf dem jeweiligen Produktbehältnis anzuwenden.



Zur Beachtung beim Umgang mit dem Produkt gem. Gefahrstoffverordnung

BevistoSept plus ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

CE 0483

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt.
Verwendung nur durch medizinisches Fachpersonal.



Produkt vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

